

GOED GEBRUIK HANDSCHOENEN

HANDSCHOENEN AANTREKKEN

Desinfecteer je handen met handalcohol



Pak de handschoenen uit de doos



Trek de handschoen aan en trek de manchet goed over de pols



HANDSCHOENEN UITTREKKEN

Pak de handschoen in de palm van de hand vast en trek de handschoen uit. Plaats de uitgetrokken handschoen in de palm van de andere hand en sluit de hand



Plaats met de nu blote hand twee vingers onder de manchet van de overige handschoen, raak de buitenoppervlakken niet aan!



En trek de handschoen over de gesloten hand, open de gesloten hand en verwijder de handschoenen



Gooi de handschoenen in de prullenbak



Desinfecteer je handen met handalcohol

